


Monteringsanvisning

Motion er en frittstående el-seng som leveres ferdig montert. Det eneste montasjen du selv må gjøre, er å trykke på plass de medfølgende benene i hvert av de respektive hjørnene.

Videre må batteripolene til nødstrømsbatteriet som er montert på motoren klemmes på plass. Denne funksjonen er for å kunne kjøre sengen ned i tilfelle strømbrudd på nettet.

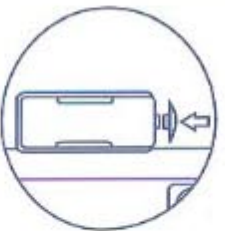

Klemmene trykkes fast mot batteripolene.

Betjeningsinstruksjon

Med fjernkontrollen kan du heve eller senke hode- og fotenden til den posisjonen du ønsker. Du kan også heve/senke hode- og fotende samtidig.

